


BIEN UTILISER LES LÈVE-PERSONNES

Winn'Motion 175 ET 150

by Winnicare



Winn'Motion 175

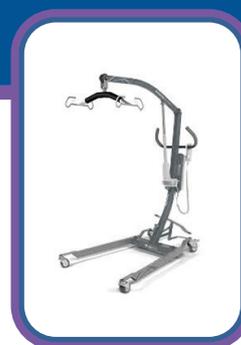

Winn'Motion 150

I AVANT L'UTILISATION, VÉRIFIER SON BON ÉTAT GÉNÉRAL

- 1 Le poids du patient doit être inférieur à la charge maximale indiquée sur l'appareil.
- 2 Vérifier le niveau de batterie (voir l'indicateur).
- 3 Vérifier le bon roulage des roues.
- 4 Ouvrir au maximum l'écartement de la base pour assurer une bonne stabilité.
- 5 Vérifier le bon fonctionnement des freins.

II CHOISIR L'ÉLÉMENT DE SOUTIEN ADÉQUAT


- 6 Utiliser l'élément correspondant au poids et à la taille du patient (voir indications au dos).
- 7 Vérifier l'état de l'élément de soutien et des sangles (usures ou dommages éventuels).

III BIEN INSTALLER LE PATIENT SUR LE LÈVE-PERSONNE

- Verrouiller les roues du fauteuil ou du lit avant le transfert de la personne.
- Installer le patient dans l'élément de soutien. La position recommandée des bras et des jambes varie en fonction du type d'appareil (voir notre notice fabricant winncare).
- Placer les sangles dans les crochets de la barre de préhension prévus à cet effet. Les boucles doivent être correctement accrochées sur l'appareil.

A B C D

! Attention : Ne pas fixer les sangles autour du clip de sécurité **D**

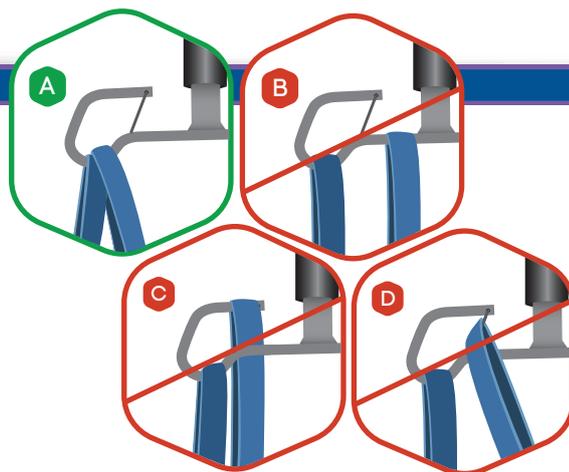

IV SÉCURISER LE TRANSFERT DU PATIENT

- Vérifier l'absence d'obstacles autour de l'appareil et sur le chemin du transfert.
- Surveiller le positionnement des sangles dans les crochets de la barre de préhension.
- Ne jamais laisser la personne transférée sans surveillance.
- Ne jamais soulever un patient plus haut que l'opération ne le nécessite.
- Veiller à ce que la personne transférée ne se tienne pas à la barre de préhension.
- En cours de manipulation, si besoin, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence du lève-personne (bouton rouge).
- Toujours lever avec la sangle à la verticale.
- Pendant le levage, les roues doivent être déverrouillées. Verrouiller les roues si le transfert démarre au sol.

WINN
g r o u p e
CARE